

BELOTERO®



# COME CLOSER

The smooth, natural way  
to your full beauty potential  
with hyaluronic acid treatment.



merzaestheticsbeauty\_nl



merzaestheticsbeautynl

MERZ AESTHETICS®



We kennen allemaal dat stemmetje in ons hoofd wanneer we onszelf in de spiegel zien...

Wat zou het fijn zijn om wat meer controle te hebben over ons uiterlijk. Wat zou er gebeuren als kleine, subtiele aanpassingen genoeg zouden zijn om onze volledige potentiële schoonheid te tonen, zonder dat dit erg afwijkt van ons normale uiterlijk?

Met de complete BELOTERO®-productlijn van fillers op basis van hyaluronzuur **is een behandeling mogelijk die precies is aangepast** aan het door u gewenste harmonieuze en natuurlijke resultaat, zowel om fijne lijntjes te vervagen als volume toe te voegen. **Dankzij de vernieuwende gepatenteerde CPM®-technologie** wordt een optimale opname in de huid bereikt **voor natuurlijke resultaten**.

**Vertel uw arts welke wensen u hebt, zodat hij of zij u kan vertellen welke behandelmogelijkheden er zijn.**

# VAN DICHTBIJ

Schoonheid is een combinatie van zelfvertrouwen, unieke kenmerken en harmonie in het gezicht. Wat de leeftijd ook is, pas wanneer iemand in harmonie is met zichzelf, kan hij zijn ware ik met zelfvertrouwen laten zien.

Come closer! Laat iedereen uw unieke en natuurlijke schoonheid zien. Of het nu gaat om slechts een kleine correctie of een complete transformatie, het zijn uw eigen keuzes die maken dat u goed in uw vel zit en dat u zich kunt laten zien zoals u bent, van dichtbij.

## Uw huid verandert met de leeftijd

Huidveroudering is onvermijdelijk. Factoren als UV-straling, gezichtsuitdrukkingen, stress, slaapgebrek, hormonale veranderingen en voedsel kunnen dat proces versnellen. Zelfs de gezondste leefstijl kan het natuurlijke proces van veroudering van de huid niet tegenhouden.

De huid maakt steeds minder natuurlijke vochtinbrengers als hyaluronzuur aan. Huidcellen delen zich minder snel en het vocht- en vetgehalte in de huid vermindert. Dit leidt uiteindelijk tot dunner worden en dehydratie van de huid. De huid verliest elasticiteit, volume en contour. De eerste rimpeltjes verschijnen rond de ogen en bij de mondhoeken; een proces dat in de loop van jaren versterkt wordt.



### Wist u dat onze botstructuur verandert met de leeftijd?

Als u ziet dat uw jukbeenderen vlakker worden en de plooien tussen neus en lippen duidelijker zichtbaar, dat de kaaklijn minder uitgesproken wordt, het voorhoofd platter of de kin korter of vlakker, dan zijn dat doorgaans tekenen van verminderde ondersteuning door botweefsel.



### Veranderingen in het vetweefsel.

Terwijl een jong gezicht rond en vol is, is dat van een ouder persoon mager en hoekig. We verliezen namelijk vetweefsel uit ons gezicht en daardoor volume. De rimpels en plooien die ontstaan, worden steeds zichtbaarder. Daardoor kunnen sommige zones van het gezicht donkerder worden, wat een vermoeide indruk maakt.



### Veranderingen van de gewrichtsbanden.

Ook al ziet u het niet, ook de ligamenten veranderen met de leeftijd. De structuur gevende ligamenten vormen de verbinding tussen botten en spieren, maar ook tussen het onderliggende steunweefsel (SMAS) of de brede huidspier in de hals (de platysma) en de huid. Ze dienen om de verschillende structuren, zoals vet en huid, op hun plaats te houden. Het SMAS en de platysma zijn fijne spierstructuren onder de huid die met het verloop der jaren afnemen. De veranderingen in spieren en botten door de leeftijd hebben ook invloed op de ligamenten, het SMAS, de platysma en dus de huid. Vetweefsel wordt minder ondersteund en gaat meer hangen.

Om de veroudering van het gezicht te verminderen, zijn er oplossingen op maat afhankelijk van de behoeften van de patiënt. Een behandeling op basis van hyaluronzuur is een van de oplossingen.

## Wat is hyaluronzuur?

Of het nu gaat om crèmes, maskers of gezichtssprays, veel cosmetische producten bevatten hyaluronzuur. Hyaluronzuur is een natuurlijk bestanddeel van het bindweefsel dat zorgt voor hydratatie van de huid. Hierdoor vult hyaluronzuur de huid op, maakt het deze gladder en verbetert het de elasticiteit.

Maar met het vorderen der jaren neemt de concentratie natuurlijk hyaluronzuur af, begint de huid zijn elasticiteit te verliezen en dehydrateert, en verschijnen er rimpels. Tegen de tijd dat we veertig worden, is de oorspronkelijke voorraad hyaluronzuur gehalveerd, waardoor de huid droog wordt en de eerste rimpels verschijnen.

Dankzij wetenschappelijke ontwikkelingen is men erin geslaagd hyaluronzuur te synthetiseren zodat het kan worden gebruikt om de gestage afname ervan in de huid te compenseren. Hyaluronzuur dat in fillerproducten wordt gebruikt, is een transparante gel die min of meer viskeus is, afhankelijk van de crosslinking in het product. Vandaag de dag pakken injectables met hyaluronzuur een aantal aspecten van het verouderingsproces aan en worden ze gebruikt bij verschillende procedures.

Fillers uit de BELOTERO®-productlijn worden gebruikt voor de behandeling van rimpels, herstel van volume, strakker maken van contouren, verbetering van de huidkwaliteit (skinbooster) en vergroting van het volume van de lippen.

## Het principe van een injectie met BELOTERO®

BELOTERO® is een filler op basis van hyaluronzuur. Het vervangt het van nature in het lichaam aanwezige hyaluronzuur dat vanaf de leeftijd van 30 jaar langzaam afneemt. Met deze injecties kunnen bijvoorbeeld rimpels worden opgevuld en met name het volume van de lippen of jukbeenderen worden vergroot. Daarnaast verbetert de skinbooster de huidkwaliteit.

Het is een biologisch afbreekbaar product dat op natuurlijke wijze in het lichaam wordt afgebroken. De ingreep moet dus worden herhaald als u het bereikte resultaat wilt behouden. Het voordeel hiervan is dat de ingrepen omkeerbaar en dus minder beangstigend zijn dan de definitieve aard van sommige cosmetische operaties.

## Er zijn verschillende fillers op basis van hyaluronzuur op de markt.


Het voornaamste verschil is de technologie waarmee hyaluronzuur wordt geproduceerd.

**“Dankzij de vernieuwende gepatenteerde CPM®-technologie wordt een optimale opname in de huid bereikt, voor natuurlijke resultaten.”**

# OPTIMALE INTEGRATIE IN HET WEEFSEL

## De voordelen van de CPM®-technologie

Wilt u weten hoe het komt dat fillerproducten van BELOTERO® optimaal worden opgenomen? Het antwoord daarop is heel eenvoudig: onze gepatenteerde CPM®-technologie. Het gehele proces leidt tot een unieke formulering voor een optimale integratie in het weefsel, met zones van verschillende dichtheid. Terwijl gewone fillers onregelmatigheden onder de huid kunnen veroorzaken, past BELOTERO® zich aan en wordt op natuurlijke wijze opgenomen zonder ontstekingsreacties te veroorzaken.

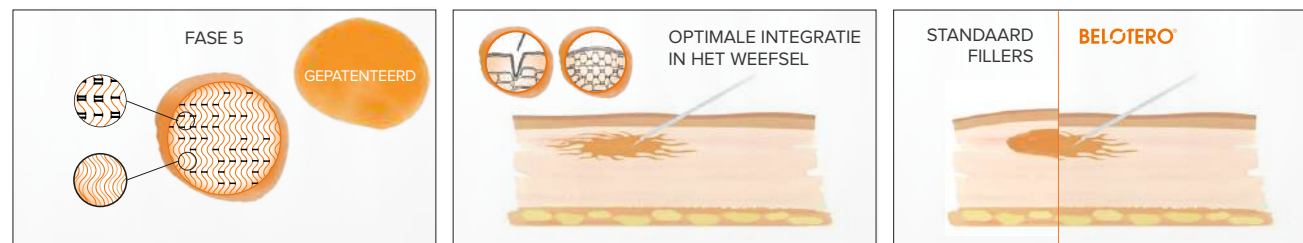

De onder de huid te injecteren fillers uit de BELOTERO®-productlijn zijn speciaal ontwikkeld op basis van hyaluronzuur en bieden een waaiër aan cosmetische oplossingen. De lijn is speciaal ontwikkeld voor een behandelprogramma op maat met elkaar aanvullende onderdelen. De BELOTERO®-lijn van fillers op basis van hyaluronzuur, die wordt geproduceerd in Zwitserland en over de hele wereld is goedgekeurd, wordt al meer dan 15 jaar toegepast.

### Een natuurlijk resultaat met behoud van uw unieke gezichtsuitdrukkingen


Dankzij de CPM®-technologie die voor BELOTERO® wordt gebruikt, blijven uw gezichtsuitdrukkingen behouden, waardoor een onnatuurlijk resultaat wordt vermeden.

## Waarom vertrouwen op BELOTERO®-producten?

- Hoge mate van tevredenheid van patiënten
- Vastgesteld veiligheidsprofiel
- Duurzame resultaten voor een natuurlijk resultaat

## Wat maakt de BELOTERO®-productlijn anders?

- Producten die speciaal zijn ontwikkeld voor een cosmetische behandeling op maat
- Optimale integratie in het weefsel, om op natuurlijke wijze op te gaan in de huid
- Gepatenteerde unieke CPM®-technologie voor flexibele resultaten op maat

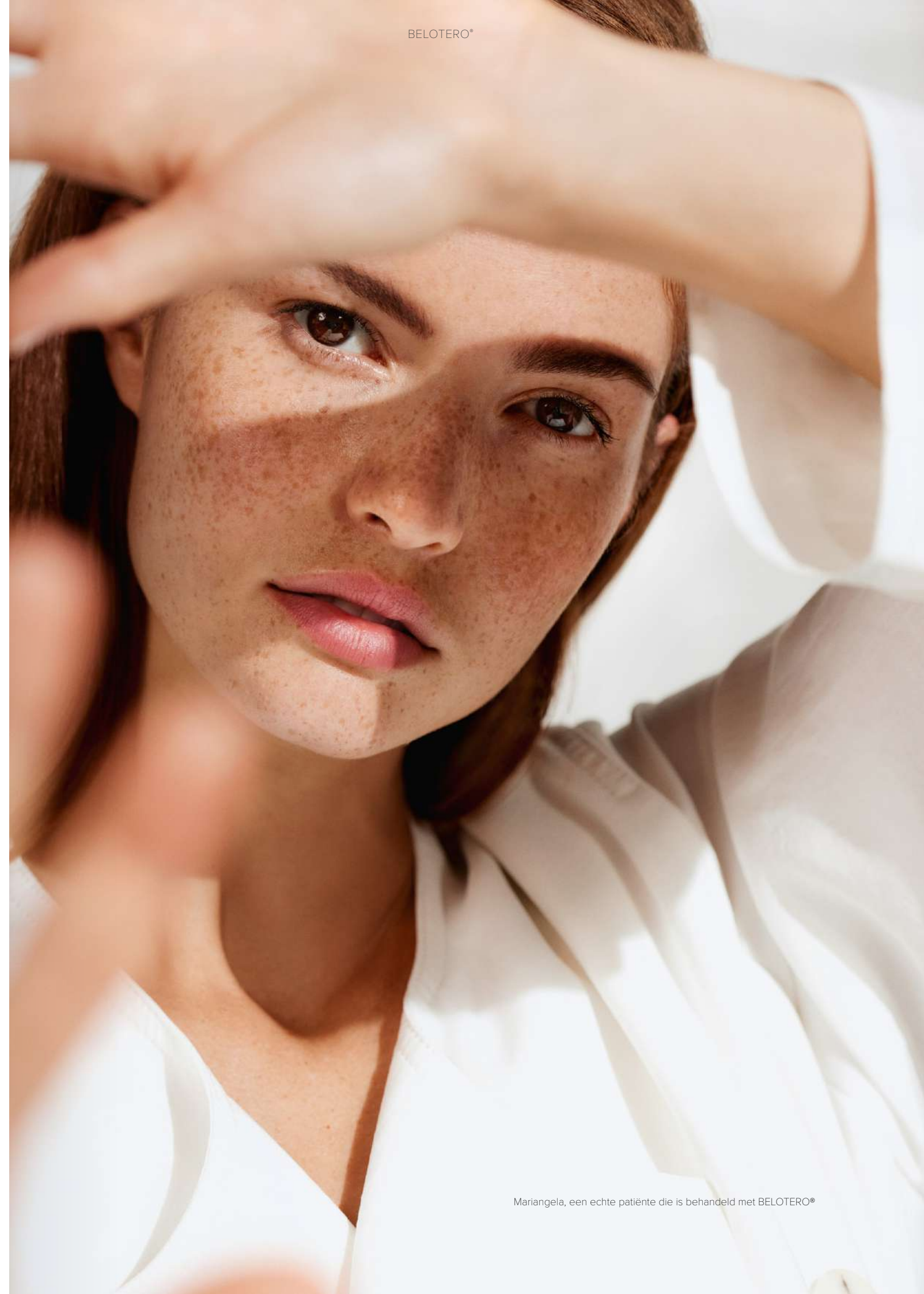

# OP MAAT GEMAAKT


**Elk gezicht en elk huidtype is anders.  
Ook heeft elke patiënt zijn eigen eisen  
wat betreft schoonheid.**

De BELOTERO®-productlijn bestaat uit een reeks fillers met verschillende concentraties hyaluronzuur, speciaal ontwikkeld voor verschillende effecten en behandeling van verschillende zones van het gezicht.

Een nauwelijks invasieve behandeling van ongeveer 30 minuten kan voldoende zijn om uw huid een natuurlijk uiterlijk te geven, zodat uw unieke schoonheid beter tot zijn recht komt. Hiermee kunnen lijntjes en rimpels worden verminderd en kan tegelijk uw gezicht contouren, hydratatie, een frisse teint en een fraai glad uiterlijk krijgen.

## Hoe verloopt een behandeling?

De gel met hyaluronzuur wordt in de huidlagen geïnjecteerd, oppervlakkig of juist dieper, afhankelijk van de behandeling. Met de gel kunnen lijntjes en rimpels worden opgevuld, de contouren van het gezicht strakker worden gemaakt en volume aan de lippen worden toegevoegd. Een hoeveelheid van 0,5 ml filler is voldoende voor kleine correcties. Voor een volledige behandeling is doorgaans ongeveer 5 ml nodig.

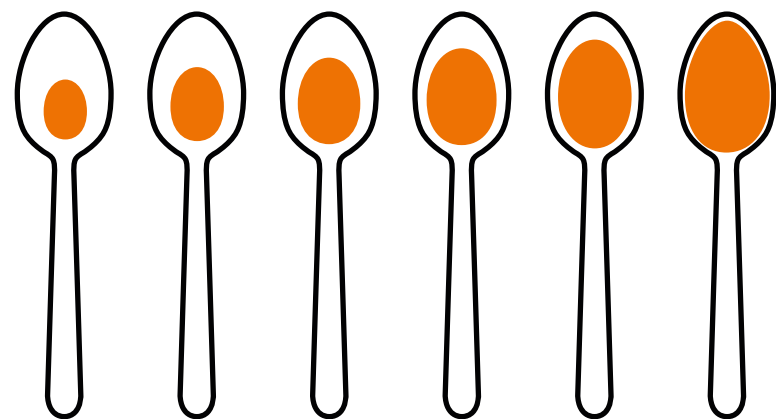

**0,5 ml** ½ spuit  
**1 ml** volle spuit  
**2 ml**  
**3 ml**  
**4 ml**  
**5 ml** complete behandeling

**Laat uw schoonheid tot  
haar recht komen met een  
behandeling op maat met  
BELOTERO®-fillers.**

**1**

Vermindering van lijntjes en rimpels

**2**

Vermindering van lijntjes en kringen

**3**

Strakkere gezichtscontouren en  
meer volume

**4**

Een opgefrist uiterlijk

**5**

Verzachte rimpels en lijntjes

**6**

Volle en harmonieuze lippen

# DE BELOTERO®-LIJN VAN FILLERPRODUCTEN

## De opties voor uw behandeling

BELOTERO® biedt een lijn van producten die speciaal zijn ontwikkeld om aan uw wensen te voldoen. Bepalen welke behandeling het best bij u past, is essentieel. Daarom kan het nuttig zijn uzelf een paar vragen te stellen wanneer u in de spiegel kijkt, om te bepalen welke zones u storen. Met de antwoorden op die vragen is het mogelijk de 'oplossing' te vinden en te bepalen welke BELOTERO®-behandeling het best past bij uw wensen.

Ben ik moe of zegt men vaak dat ik er moe uitzie?

FRISHEID EN HYDRATATIE VAN DE HUID



**BELOTERO® REVIVE**

De skinbooster

Wil ik meer volume in mijn lippen?

VOLLE EN HARMONIEUZE LIPPEN



**BELOTERO® Lips**  
Shape and Contour

Voor het definiëren van de lipcontour  
Voor het creëren van volume in de lippen

Wil ik dat mijn uiterlijk overeenkomt met hoe oud ik me vanbinnen voel?

VERMINDERING VAN LIJNTJES EN RIMPELS, DEFINIËRING VAN DE CONTOUREN



**BELOTERO® SOFT**

Verzachten van fijne lijntjes



**BELOTERO® BALANCE**

De filler voor verschillende toepassingen



**BELOTERO® INTENSE**

De structurerende/liftende filler voor een optimale opvulling

Zou mijn gezicht iets meer volume mogen hebben?

STRAKKERE GEZICHTSCONTOUREN EN MEER VOLUME



**BELOTERO® VOLUME**

De filler die het volume van het gezicht herstelt

Ontdek de behandelingen met BELOTERO® die speciaal zijn ontwikkeld om aan uw wensen te voldoen. De BELOTERO®-productlijn bestaat uit 7 verschillende fillers.

Aurélie, een echte patiënte die is behandeld met BELOTERO®


# DE SCHALEN VAN MERZ AESTHETICS

## Een essentieel hulpmiddel voor het consult

Dit is een heldere, visuele weergave van het verouderingsproces als ondersteuning voor een objectief gesprek tussen arts en patiënt bij het consult over problemen en doelen van een cosmetische behandeling. Aan de hand van deze objectieve, eenvoudige en gebruiksvriendelijke schaal met foto's van 5 stadia wordt de mate van veroudering in het gezicht bepaald. Ze ondersteunen het gesprek en de communicatie tussen arts en patiënt tijdens het consult zodat een persoonlijk behandelplan kan worden opgesteld.

### Neus-lippenplooien

De plooien tussen neus en mondhoeken, de neus-lippenplooien of ook wel lachrimpels genoemd, zijn vaak de eerste tekenen van veroudering in het gezicht. Door constante spieractiviteiten zoals lachen en praten worden deze rimpels dieper.

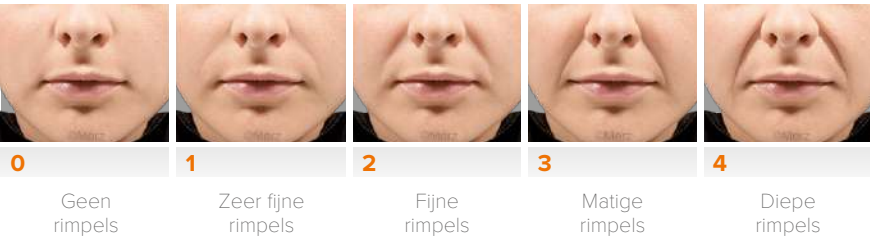

### Lippen

De lippen worden dunner en meer getekend naarmate we ouder worden.




### Verticale liplijnen

Boven de lippen kunnen als gevolg van veel activiteit van de mond fijne lijntjes ontstaan, deze worden ook wel de verticale liplijnen genoemd.




### Traangoot

De traangoten (ook wel wallen genoemd) kunnen met verstrijken van de tijd gaan hangen of een meer zichtbare kleur krijgen, wat kan ogen als een vermoeide uitstraling.

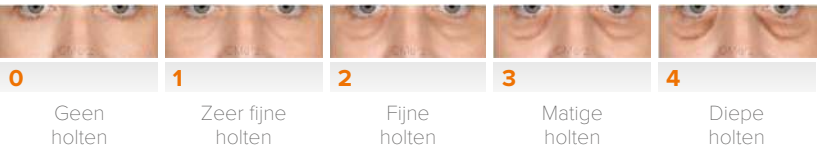

### Marionetlijnen

Marionetlijnen zijn de lijnen die vanaf de mondhoeken naar de kin lopen. Ook deze kunnen op vrij jonge leeftijd ontstaan en zorgen vaak voor een droevige blik.

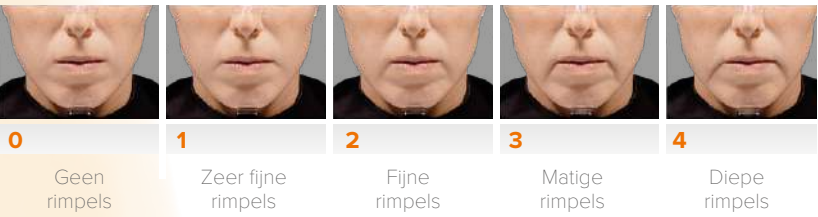

### Jukbeenderen

Een belangrijke verandering treedt op ter hoogte van de jukbeenderen. Deze zone is met name onderhevig aan volumeverlies. Door volumeverlies ter hoogte van de jukbeenderen ontstaan vaak ook rimpels en plooien aan de onderkant van het gezicht (bijvoorbeeld de neus-lippenplooien).



# ZICHTBARE RESULTATEN MET EEN NATUURLIJK UITERLIJK




**Marion**  
**Voor**

Deze patiënte was ontevreden met de rimpels die in de loop van de tijd tussen haar neus en mond, en rond de lippen waren verschenen.



**Na**

De na-foto is 14 dagen na de behandeling genomen. Deze patiënte kreeg een injectie met 1 ml BELOTERO® Volume met lidocaïne, 1 ml BELOTERO® Intense met lidocaïne, 1 ml BELOTERO® Balance met lidocaïne en 0,6 ml BELOTERO® Lips Shape. De behandelde zones zijn lippen, marionetlijnen, rokerslijntjes en wangen.

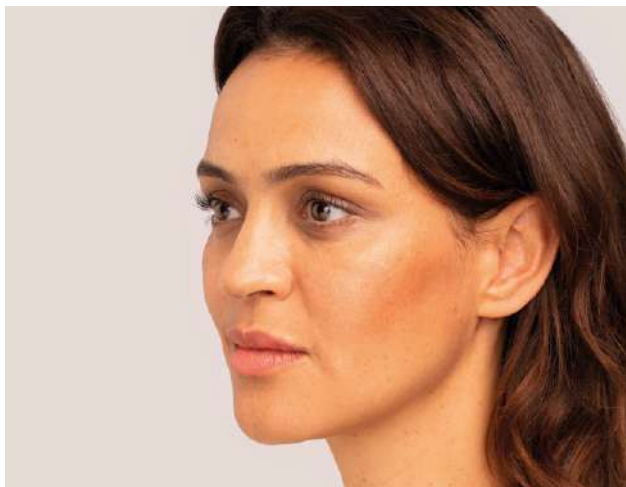

**Siham**  
**Voor**

De patiënte wilde volume en een liftend effect, vermindering van lijntjes en rimpels, en vollere lippen.



**Na**

De na-foto is 14 dagen na de behandeling genomen. Deze patiënte kreeg een injectie met 1 ml BELOTERO® Volume met lidocaïne, 1 ml BELOTERO® Intense met lidocaïne, 3 ml BELOTERO® Volume met lidocaïne en 0,6 ml BELOTERO® Lips Contour. De behandelde zones zijn het gebied rond ogen, wangen en lippen.

De foto's zijn niet bewerkt. Individuele resultaten kunnen variëren; vraag advies aan uw arts.



**Carolin**  
**Voor**

De patiënte stoorde zich aan de roodheid van de huid, de vlekkerige teint en de eerste zichtbare rimpels in de nasolabiale zone. Ze wilde er frisser uitzien.




**Na**

De na-foto is 14 dagen na de behandeling genomen. De patiënte kreeg een injectie met 2 ml BELOTERO® Balance met lidocaïne. De behandelde zones zijn lippen, marionetlijnen en het gebied rond de ogen.



**Simone**  
**Voor**

De patiënte wilde vermindering van lijntjes en rimpels, herstel van volume en een algehele verbetering van het uiterlijk.

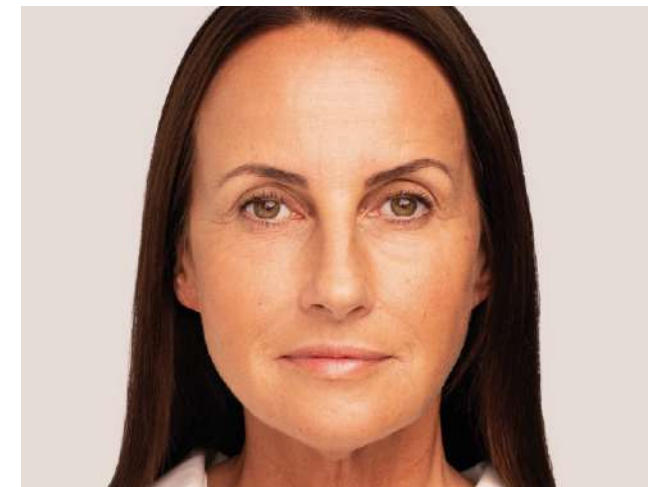

**Na**

De na-foto is 14 dagen na de behandeling genomen. De patiënte kreeg een injectie met 3 ml BELOTERO® Balance met lidocaïne en 7 ml BELOTERO® Volume met lidocaïne. De behandelde zones zijn wangen, kin, slapen, marionetlijnen, de kringen onder de ogen en lippen.

De foto's zijn niet bewerkt. Individuele resultaten kunnen variëren; vraag advies aan uw arts.

# HET UITERLIJK IS OOK EEN MANNENZAAK

Bij mannen worden rimpels vaak gezien als bewijs voor ervaring en rijpheid. Maar is dat nog steeds zo als verlies van volume en diepere rimpels op het voorhoofd en rond de neus en mond voor altijd uw uitstraling veranderen zodat u er moe en chagrijnig uitziet? En ook wanneer uw gezicht niet meer weergeeft wat u echt voelt?

De gevolgen van het natuurlijke proces van huidveroudering zijn geen onoverkomelijke ramp. Een behandeling met BELOTERO® is een oplossing in de strijd tegen rimpels en volumeverlies. Gerichte injecties met hyaluronzuur kunnen rimpels aanzienlijk verminderen. De overgang tussen behandelde en niet-behandelde zones is subtiel en vrijwel onzichtbaar, wat een duurzaam en natuurlijk uitziend resultaat geeft.

## De huid van mannen is anders

### Van nature steviger

Hoewel de huid van mannen vaak meer weerstand geeft en steviger is dan die van vrouwen, kunnen mannen met het vorderen der jaren toch ook last krijgen van verminderde elasticiteit: de contouren worden vager en het gezicht verliest zijn mannelijkheid.

### Rimpels verschijnen later, maar zijn dieper

Bij mannen verschijnen rimpels later, maar ze worden vaak sneller dieper dan bij vrouwen van dezelfde leeftijd.

### Dynamische rimpels en fronsrimpels

De horizontale rimpels op het voorhoofd zijn de eerste rimpels in het gezicht van de man. In combinatie met de verticale rimpels tussen de wenkbrauwen kunnen ze het gezicht een ernstig aanzien geven.



Voor



Na

Deze patiënt kreeg een injectie met 2 ml BELOTERO® Balance met lidocaïne en 2 ml BELOTERO® Revive. De behandelde zones zijn de nasolabiale plooï, het voorhoofd en de wangen.

De na-foto is 14 dagen na de behandeling genomen.



Andreas, een echte patiënt behandeld met BELOTERO®

# VEELGESTELDE VRAGEN

## Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen voor een behandeling met BELOTERO®?

Vóór elke behandeling moet er een bepaald aantal stappen worden doorlopen:

- U krijgt van uw arts een vragenlijst om in te vullen. Doe dat zo nauwkeurig mogelijk. Uw gezondheidstoestand kan invloed hebben op de behandeling en het resultaat. Voorbeelden hiervan zijn:
  - een eerdere behandeling met een filler
  - een eerdere chirurgische ingreep
  - recent of actueel gebruik van geneesmiddelen
  - de algehele toestand van de huid, waaronder een grotere gevoeligheid voor producten op basis van hyaluronzuur.

- Uw arts zal u informeren over de verschillende behandelmogelijkheden, het beoogde effect, de voordelen en de risico's. De meest voorkomende bijwerkingen zijn (zoals bij elke injectie):

- oedeem
- zwelling
- pijn
- jeuk
- verkleuring van de huid
- gevoeligheid op de plek van de injectie
- vorming van knobbeltjes.

Hoewel de bijwerkingen doorgaans niet ernstig en tijdelijk zijn, is het wel belangrijk om er rekening mee te houden.

- Uw arts stelt een persoonlijk behandelplan op en bespreekt met u de verschillende mogelijkheden van het product met of zonder lidocaïne. BELOTERO® is beschikbaar in beide varianten.
- Wat voor de behandeling besproken moet worden:
  - Hoe lang het behandel-effect aanhoudt.
  - Wat de kosten zijn van de behandeling.
  - Of er rekening moet worden gehouden met andere zaken.

## Hoe verloopt een behandeling met BELOTERO®?

- Vóór elke behandeling bespreekt de arts uw wensen en verwachtingen met u. Na dat gesprek stelt hij of zij een persoonlijk behandelplan voor op basis van uw wensen en geeft hier uitleg bij. Zodra u een besluit hebt genomen, kan de behandeling beginnen. Uw arts injecteert de geselecteerde BELOTERO®-producten rechtstreeks in de huid van de specifieke zone om de rimpels te verzachten, het volume in uw gezicht te herstellen, de contouren strakker te maken en het volume van de lippen te vergroten.
- De fillerbehandeling zelf kan wat ongemak of pijn veroorzaken. Daarom kan er een lichte plaatselijke verdoving worden toegepast om de behandeling zo comfortabel mogelijk te laten zijn.
- Om een homogeen resultaat te verkrijgen, masseert de arts de behandelde zone, wat roodheid of tijdelijke zwelling kan veroorzaken. Uw arts zal u goed adviseren welke voorzorgsmaatregelen u na de behandeling moet nemen.
- Een behandeling duurt doorgaans ongeveer 30 minuten, maar dat is afhankelijk van het behandelplan.

## Welke voorzorgsmaatregelen moet u na de behandeling nemen?

- De meeste patiënten hervatten hun dagelijkse bezigheden onmiddellijk na de behandeling. Volg niettemin het advies op dat uw behandelend arts u hierover geeft.
- Na de injectie kan een licht of wat heviger branderig of pijnlijk gevoel optreden. De behandelde zone kan enkele dagen na de behandeling een beetje gevoelig blijven.
- Er kan een zwelling of verkleuring (roodheid, blauwe plekken) ontstaan op de injectieplaats. Dit is een vaak voorkomende, maar tijdelijke bijwerking na een injectie.
- Om de duur en grootte van eventuele bloeduitstortingen te beperken, kunt u in de uren na de behandeling een (ijs)koud kompres op de behandelde zone(s) leggen. Als de zwelling en de roodheid langer dan 5 dagen aanhouden, neem dan contact op met uw behandelend arts.
- Tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft, kunt u de behandelde zone na 24 uur voorzichtig reinigen en make-up aanbrengen.
- De eerste week na de behandeling mag u de behandelde zone niet blootstellen aan intense warmte (zonlicht, solarium, sauna, enz.) of andere intensieve gezichtsbehandelingen.
- Geadviseerd wordt om een controleafspraak met uw arts te maken.
- BELOTERO® is een biologisch afbreekbaar product dat op natuurlijke wijze in het lichaam wordt afgebroken. De ingreep moet dus worden herhaald als u het bereikte resultaat wilt behouden.

Wat moet u weten vóór uw behandeling?

# VRAGEN EN ANTWOORDEN

## Wat is het goede moment voor een behandeling met BELOTERO®?

Er is geen 'goed moment'. Het is een persoonlijke beslissing afhankelijk van de vraag of de fijne lijntjes of rimpels, of het vermoeide uiterlijk van uw gezicht u storen of omdat u een jongere, frissere huid wilt. De BELOTERO®-productlijn vormt een brede waaier van oplossingen om aan uw wensen te voldoen.

## Is de behandeling met BELOTERO® pijnlijk?

De behandeling met BELOTERO®-producten gaat doorgaans gepaard met minimale stress en pijn. Met uitzondering van BELOTERO® Revive zijn alle fillers in het assortiment ook verkrijgbaar met lidocaïne om de behandeling pijnloos te laten verlopen. Daarnaast kan een plaatselijke verdoving worden toegepast.

## Heeft de behandeling onmiddellijk effect?

Ja, kort na de behandeling kunt u al resultaat zien, en dat resultaat zet na enkele dagen door.

## Moet ik vrij nemen van mijn werk of rust nemen na de behandeling?

Nee, u hoeft geen rekening te houden met een langere herstelperiode. U kunt al snel niet meer zien waar de prikplaats zat.

## Gaan ze u vragen of u een cosmetische behandeling hebt ondergaan?

Dankzij de vernieuwende gepatenteerde CPM-technologie wordt een perfecte opname in de huid bereikt, voor natuurlijke resultaten die voldoen aan de strengste veiligheidsvoorschriften. BELOTERO® geeft een natuurlijk resultaat, en patiënten geven aan er tevreden over te zijn. U ziet er nog steeds uit zoals anders, alleen met extra frisheid of natuurlijke harmonie, afhankelijk van de gekozen behandeling, uw persoonlijke voorkeur en de gewenste resultaten.

## Wat zijn de mogelijkheden voor mooiere lippen?

Zoals u ook uw lippen met lippenstift en -potlood kunt accentueren, kunnen de twee BELOTERO®-fillers voor de lippen het volume vergroten en de contouren van uw mond op gerichte wijze versterken. BELOTERO® Lips Shape geeft meer volume aan uw lippen, terwijl BELOTERO® Lips Contour de contouren verfrist en versterkt.

## Wat is een effectieve manier om de huid op te frissen?

BELOTERO® Revive hydrateert uw huid van binnenuit dankzij een mengsel van hyaluronzuur en glycerol waardoor hij er weer stralend uit ziet.

## Wordt BELOTERO® goed verdragen?

Het is aangetoond dat BELOTERO®-producten goed worden verdragen. De injectie kan een lichte bloeding en tijdelijk oedeem veroorzaken. Vertel uw arts over uw medische voorgeschiedenis of eventuele gevoeligheden. Hij of zij kan u informeren over de mogelijke reacties en bijwerkingen.

## Kunnen BELOTERO®- producten worden gecombineerd met andere fillers?

De fillers uit de BELOTERO®-productlijn zijn ontwikkeld om in combinatie te kunnen worden gebruikt. Wat betreft het gecombineerde gebruik met andere dermale fillers moet u uw arts raadplegen voor een deskundig oordeel.

## Wat moet ik doen in geval van bijwerkingen?

Neem contact op met uw behandelend arts.

## Hoe lang houdt het effect van een behandeling met Belotero® aan?

Hoewel de resultaten van een BELOTERO®-behandeling duurzaam zijn, zijn ze niet blijvend doordat het lichaam de gel met hyaluronzuur in de loop van de tijd afbreekt. De meeste patiënten herhalen de behandeling na zes tot twaalf maanden.

# OVER MERZ AESTHETICS®

Merz Aesthetics® is wereldwijd toonaangevend op het gebied van esthetische geneeskunde. Onze missie is het bevorderen van zelfvertrouwen zodat mensen over de hele wereld beter leven, zich beter voelen en er beter uitzien.

Merz Aesthetics® is een pionier binnen de cosmetische industrie die zich onderscheidt door het streven bij iedereen het zelfvertrouwen te bevorderen. Onze klinisch beproefde producten bestaan uit injectables en hulpmiddelen die zijn ontworpen om te beantwoorden aan de behoeften van elke patiënt en die voldoen aan de hoogste standaarden voor veiligheid en werkzaamheid.

Ga voor meer informatie naar uw expert op cosmetisch gebied of naar [merzaesthetics.nl](https://merzaesthetics.nl).



[merzaestheticsbeauty\\_nl](https://www.instagram.com/merzaestheticsbeauty_nl)



[merzaestheticsbeautynl](https://www.facebook.com/merzaestheticsbeautynl)



MERZ AESTHETICS®



Alle modellen in deze brochure zijn echte patiënten van MERZ AESTHETICS®.

BELOTERO®

PQC NLNL 3370 MAR22

Merz Pharma Benelux B.V. | Hoevestein 36 D | 4903 SC Oosterhout Nederland | [www.merzaesthetics.nl](http://www.merzaesthetics.nl)



[merzaestheticsbeauty\\_nl](#)



[merzaestheticsbeauty\\_nl](#)

MERZ AESTHETICS®